





Inlay / onlay preparáló készlet

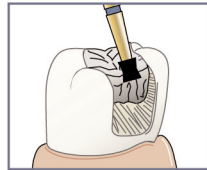


813-018-2 ML

Ideális forma az amalgám-tömések gyors és egyszerű eltávolításának első lépéseként.

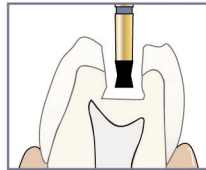


806-016-2.5 ML

A végső amalgámtávolítást ezután egy gallérformájú, kis átmérőjű gyémánttal végezzük.

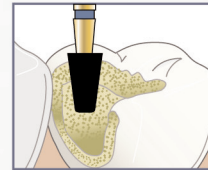


845R-025-4 ML

Ezekkel a gyémántokkal preparáljuk az inlay / onlay-kavítás alját és falait. Így létrejön a kavítás alja felé szűkülő rés lekerekített belső éllel és egy ideális behelyezési irány az inlay számára.

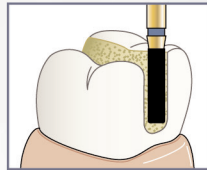


836R-014-6 ML

A henger alakú gyémánt lecsapott véggel az approximális rész precíz alakítására szolgál, mely egyben lekerekíti a belső éleket.

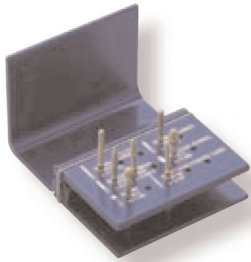


Korona és híd preparáló készlet

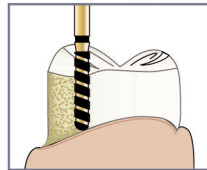


882-014-10 TSX

A gyémánt turbóspirál alakja gyors alappreparálást tesz lehetővé egy kifejezett vállal, miközben a forma egyben biztosítja a hűtést is.

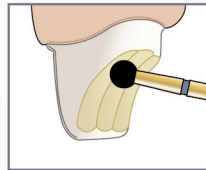


801-027 ML

A durvaszemcsés, gömb alakú gyémánt a palatinális / lingvális felületek preparálására szolgálja.

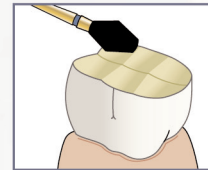

811-033-5 ML

Ez a forma alkalmas az oldalsó fogak okkluzális felületeinek csiszolására.

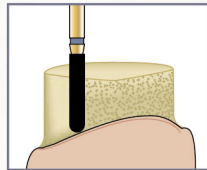


881-016-8 ML

A henger alakú, durvaszemcsés gyémánt lehetővé teszi az 1,5 mm széles vállak preparálását. Ideális teljes kerámias restaurációkhoz.




Kerámiahéj készlet

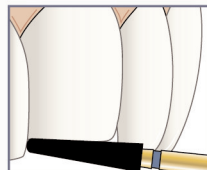


856-025-8 ML

Ez a durvaszemcsés gyémánt az incisális élék rövidítésére szolgál a vesztibuláris felületek preparálása előtt.

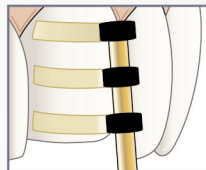


834-021-6.8 ML

Ezzel a gyémánttal 0,5 mm-es mélységet csiszolhatunk a felső frontfogak labiális felületeinek készéséhez. A 834-016 számú gyémánt 0,3 mm-es mélységet jelez, mely ideális az alsó frontfogak veneer-preparálásához.

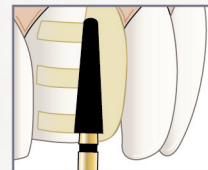


856-021-9 MLX

A hegyesedő, lekerekített gyémánt durva szemcsézett-sége ideális a vesztibuláris felületek gyors preparálásához.

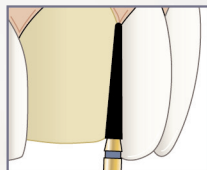


856-014-9 ML

A 9 mm hosszúságú durvaszemcsés gyémánt kitűnő az approximális területek preparálásához.

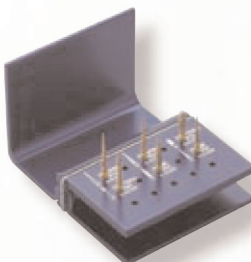


Finírozó készlet

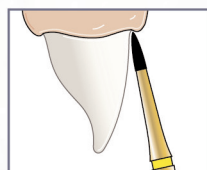


874-008-3 XF

A kónikus gyémánt hegyesen összetartó formája 25 mikron méretű szemcsékkel lehetővé teszi a gracilsabb területek kidolgozását. Ajánlatos az approximális területek és szubgingivális szélek preparálásához és finírozásához.

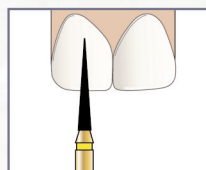


860-014-9 XF

A hosszúkás, kónikus gyémánt a kompozit- és kerámia-restaurációk megformálását és finírozását szolgálja.

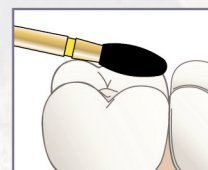


379-023-5 XF

A csepp alakú finírozó gyémánt ideális az okkluzális felületek finomításához.

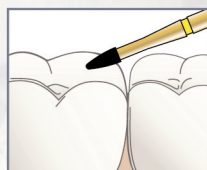


390-014-3 XF

A kúp alakú gyémánt tökéletes az okkluzális felületek legfinomabb anatómiai struktúráinak kidolgozására.

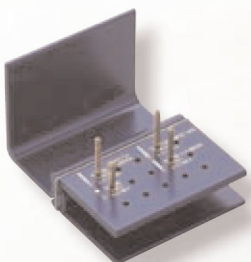


Fúrókészlet kerámia-restaurációk eltávolításához

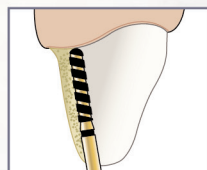


882-014-10 TSX

A turbóspirállal ellátott gyémánt lehetővé teszi a már létező restaurációk vesztibuláris felületeinek gyors preparálását, miközben a hűtés is biztosított. A preparálást célszerű a marginális területektől az incisális élék felé végezni.

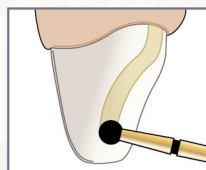


801-023 MLX

Az extra durvaszemcsés gyémánt használható a kerámia restaurációk lingvális / palatinális vagy okkluzális felületeinek felmarására.

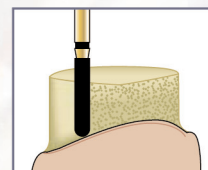

881-016-8 MLX


A lekerekített végű gyémánt ideális az utópreparáláshoz, valamint 1,5 mm mély váll kialakításához.

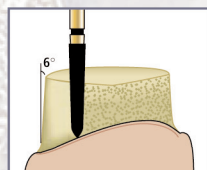

879K-018-10 MLX


Ez a gyémánt a preparáció újrakontúrozását szolgálja, miközben összetartó csomóforma keletkezik. Ideális kónuszművek preparálásához.

minimize instrumentation and maximize results

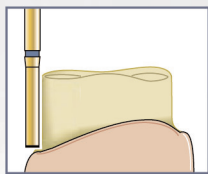


839-014 ML

A homloklafelületen gyémántokkal ellátott forma megkönnyíti a kavitás alap egyenletes és sima preparálását, valamint a tiszta, derékszögű preparációs szélek kialakítását.

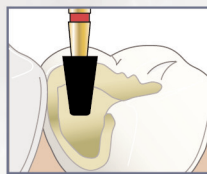


845R-025-4 F

A 45 mikron méretű szemcsékkel rendelkező gyémánt lehetővé teszi a sima preparálást.

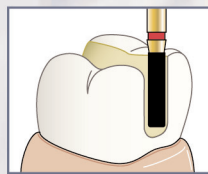


836R-014-6 F

A henger alakú finomszemcsés gyémánt az approximális rés finírozását szolgálja.

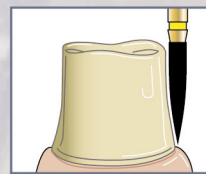


862-016-8 XF

A láng alakú 862-es jelzésű gyémánt hegyesen összetartó formája a finom preparálást szolgálja, valamint a kész restaurációk approximális és gingivális szélterületeinek finírozását.

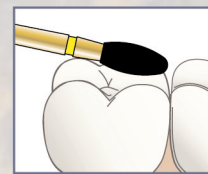


379-023-5 XF

A 25 mikron méretű szemcséknek köszönhetően a csepp alakú gyémánt alkalmas a kész restaurációk élének lekerekítésére és finírozására.

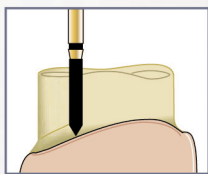


885-014-8 MLX

A végén kihegyesített extra durvaszemcsés henger alakú gyémánt a preparációs határ 45 fokos szögének kialakítását szolgálja. Ez úgy a frontfogak, mint az oldalsó fogak területén is alkalmazható.

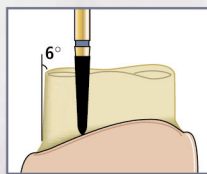


878-016-8 ML

A preparációs gyémánt kiválasztása a definitív restauráció helyigényétől függ. A vastagabb gyémánt szélesebb preparációs vállakat hoz létre.

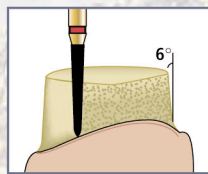


878K-012-8 F

A 45 mikron méretű szemcsékkel rendelkező gyémánt a preparációs határ, ill. az egész preparáció simítását szolgálja.

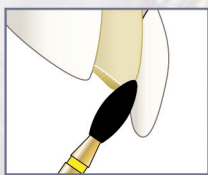


379-023-5 XF

Az extra finom, 25 mikron szemcsézettességű gyémánt a preparáció éles élének simítását szolgálja, de kész restaurációk okkluzális / linguális felületeinek finírozásánál is használható.

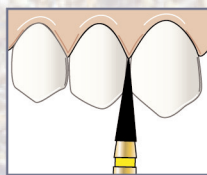

852-016-6 XF

A kónikus gyémánt extra finom szemcsézettessége főleg a kész restaurációk finom preparálására vagy finírozására alkalmas.

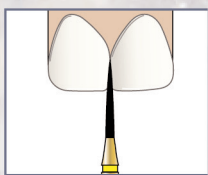

858-012-8 XF

A hosszú és hegyes végű gyémánt ideális a fogközök és az approximális felületek területeinek finírozásához.



862-016-8 XF

A láng alakjának köszönhetően ez a gyémánt alkalmas labiális és linguális / palatinális felületek megformázására és finírozására.